

محلول کنسانتره پاک کننده آنزیمی خنثی دکونکس پروزایم اکتیو Deconex - Prozyme Active یک لیتری

خصوصیات:

زداینده اختصاصی بیوفیلیم ها جهت آندوسکوپ های قابل انعطاف و غیر قابل انعطاف
زداینده باقیمانده های خون، چربی ها، پروتئین ها، کربوهیدرات ها، فیبرین های نا محلول در
آب و سایر آلودگی های روی ابزار

دارای لیپاز، پروتئاز، آمیلاز، سلولاز و ترکیبات سورفکتانت

سازگاری عالی با مواد مختلف

قابلیت آبکشی بالا و حداقل خاصیت کف کنندگی

فاقد EDTA و NTA

قابلیت استفاده در حداقل غلظت و زمان تماس

سازگاری با محیط زیست

فاقد بوی نا مطبوع

موارد مصرف:

برای پیش پاکسازی و پاکسازی ابزار و تجهیزات پزشکی به شکل غوطه وری و یا در حمام
اولتراسونیک.

طیف اثر:

ایده آل برای حذف بیوفیلیم ها به ویژه در داخل لوله های آندوسکوپ

روش مصرف:

پاکسازی دستی: محلول را 0/5٪ رقیق نموده و ابزار را به مدت 5 دقیقه در آن قرار دهید.
پاکسازی با حمام اولتراسونیک: محلول را 0/5٪ رقیق نموده و ابزار را به مدت 2 دقیقه در درون
حمام قرار دهید.

Surfospt 2 محلول کنسانتره ضدعفونی کننده سطوح سارفوسپت یک لیتری

محلول ضدعفونی کننده ی سارفوسپت 2 برای ضدعفونی کردن سطوحی که با آب قابل شستشو نیستند مورد استفاده قرار میگیرد مانند مبلمان و وسایل غیر قابل شستشو ، اتاق عمل و دیگر تجهیزات پزشکی و درمانی . محلول ضدعفونی کننده ی سارفوسپت دارای ویژگی هایی چون بوی خوب و مطبوع که باعث خوشبو شدن محیط و سطح ها می شود و هنگام استفاده با بوی خود دیگران را اذیت نمی کند ، اثر ضد میکروبی قوی دارد که ماندگاری طولانی و اثر فوری دارد ، با توجه به کاربردهای زیادی که دارد از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است ، دارای یک پاک کننده ی قوی بدون کف می باشد ، برای اثر بیشتر بر میکروب ها دارای سختی گیر آب است که با این کارایی تاثیر ماده ی موثر را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن قارچ ها -، میکروباکتریوم ها ، باکتری های گرم مثبت و منفی ، ویروس های پوشش دار مانند ویروس آنفولانزا و ایدز می شود . روش استفاده از محلول ضدعفونی کننده ی سارفوسپت به این گونه است: ابتدا باید محلول را رقیق کنید ، برای محلول 1 درصد، 10 میلی لیتر از محلول را با 990 میلی لیتر آب مخلوط کنید و بعد از رقیق شدن با استفاده از تی و یا یک دستمال محلول را روی سطح پخش کنید و به مدت 5 دقیقه ضدعفونی انجام می شود ، و

برای از بین بردن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس موجود در سطح باید 10 دقیقه زمان بگذرد تا ضدعفونی شود .

از مخلوط کردن محلول با دیگر مواد شیمیایی ها خودداری کنید زیرا ممکن است خطرناک باشد ، مراقب باشید با چشم و دهان شما برخورد نکند و غیر این صورت به پزشک مراجعه کنید . و در آخر لازم به ذکر است بدانید از محلول کنسانتره ضدعفونی کننده سطوح

یک لیتری در حالت غلیظ می توانید تا 3 سال پس از تولید Surfospt سارفوسپت 2 استفاده کنید ولی رقیق شده ی آن تا 10 روز قابل استفاده است

محلول کنسانتره ضد عفونی و پاک کننده کف زمین و سرویس بهداشتی مدل ونتی سپت 5 لیتری برند نوین پاک شرق

مشخصات کالا:

- نام کالا: محلول کنسانتره ضد عفونی و پاک کننده کف زمین و سرویس بهداشتی
- مدل: ونتی سپت
- برند: نوین پاک شرق
- مناسب برای سطوح غیر قابل دسترس
- مناسب برای انواع سطوح مقاوم در برابر الکل مطابق با توصیه های Biocide Directive
- عدم ایجاد عارضه در اثر تماس با پوست بر اساس Dermatology test
- تأیید کیفیت و کارایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
- تایید شده بر اساس استانداردهای EN اروپا
- تایید شده بر اساس RKI
- تاییدیه VAH / DGHM
- مناسب برای ضد عفونی سطوح پزشکی مطابق با Biocide directive و MPG
- ماندگاری اثر بالا به دلیل برخورداری از ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی
- اثر همزمان ضد عفونی و پاک کنندگی
- بدون لک شدن سطح
- عدم تغییر رنگ سطوح
- فاقد الکل، فنول و آلدهید
- حجم: 5 لیتر
- روش مصرف : محلول را بسته به شرایط مورد نیاز 1تا3٪ رقیق کرده و بسته به نوع سطح با استفاده از تی و یا دستمال ضد عفونی و پاک نمایید.

شیشه پاک کن Ati

شماره مجوز : ۱۱۹۹۹/۳۸

صادر کننده مجوز : سازمان غذا و دارو

سایر توضیحات : تمیز کنندگی بالا قدرت پاک کنندگی و درخشندگی عالی

دارای گواهی سیب سلامت

دارای استاندارد های تولید

گالن ۱۰ لیتر

مایع دستشویی گلرنگ

وزن : ۳۵۰ گرم

شماره مجوز : ۱۵۳۶۱/۳۸

صادر کننده مجوز : سازمان غذا و دارو

سایر توضیحات : حاوی ویتامین - مطابق با PH طبیعی پوست

شیشه پاک کن گلرنگ

حجم : ۵۰۰ میلی لیتر

شماره مجوز : ۱۹۶۳۰/۱۶

صادر کننده مجوز : سازمان غذا و دارو

نوع محفظه نگهدارنده : اسپری

سایر توضیحات

اصطکاک کمتر حین استفاده - براق کننده سطوح صاف و صیقلی - پاک کننده چربی ها و آلودگی ها از روی کلیه سطوح صاف و صیقلی - سریع خشک می شود و اثر لکه و رگه بر روی شیشه باقی نمی گذارد - جهت پاک کنندگی بهتر از دستمال نخی خشک استفاده نمایید